

# Dosieranleitung

## **Dosierung bei Verwendung beiliegender 50 ml Dosierschaufel:**

*50 ml Dosierschaufel voll gestrichen für 3 Liter Lösung/Behandlungseinheit*

1. ca. 1,5 Liter mit beiden Saugern durchsaugen
2. den Rest davon in die Speischale laufen lassen
3. mit gleicher Menge Wasser nachspülen
4. 10 Sekunden ohne Wasser nachsaugen

Lagerung: Trocken lagern, Hobbock gut verschlossen halten,  
Verbrauchsmenge abfüllen (kleiner Eimer mit Deckel)

Dorfstraße 118 · 21720 Mittelnkirchen

Tel.: 04142-23 16 · Fax: 04142-48 07

Mobil: 0170-440 69 51

mm.dentaltechnik@web.de · www.mm-dental.de



**manfred möller**  
dentaltechnik

Chargen-Nr.: